

FOR LIFE

Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH

Schimbarea sistemului stomic format din doua componente

(exemplificare ilustrată: urostomă)

Wendenschloßstraße 142
12557 Berlin

E-mail: mail@forlife-produkte.de
Web: www.forlife.info

In Romania prin: **Pharma Telnet**

Telefon: 021 250 06 20
021 224 65 85
0727 835 638 (0727TELNET)
0757 758 618
0762 071 840
031 620 85 89
031 620 85 90

E-mail: office@pharmateln.ro
info@pharmateln.ro

Fax: 031 817 51 59
021 250 06 20

Web: www.pharmateln.ro



Stimate utilizator,

În urma intervenției chirurgicale vi s-a efectuat un orificiu artificial pentru intestin sau pentru vezica urinară (denumit în continuare “stomă”).

Pentru ca dvs. să vă simțiți din nou independent, este esențial să învățați să vă schimbați singur sistemul stomic din două componente. Dorim să venim în ajutorul dvs. prin acesta broșură, care prin exemplificare ilustrată pentru urostoma, vă arată pas cu pas cum trebuie să procedați. Vă rugăm să nu vă grăbiți și să aveți răbdare până ajungeți să învățați. Nu fiți dezamăgit dacă nu reușiți din primele încercări.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă rugăm să vă adresați personalului medical specializat.

Dacă aveți întrebări legate de produsele noastre vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon menționate în broșură. Alături de produsele noastre moderne și de încredere, este la dispoziția dvs. și echipa noastră specializată pentru suport și consilierea utilizatorilor produselor Stomocur.



- 1.** Pregătiți-vă materialele necesare pentru schimbarea pungii colectoare pentru stoma.



- 2.** Curățați stoma cu ajutorul unor comprese umede dinspre exterior spre interior. Apoi procedați la fel cu comprese uscate.



- 3.** Decupați placa de baza adezivă (flansa) în funcție de șablonul de tăiere pentru conturul stomei dvs.
Sfat: un șablon de decupare confecționat anterior este indicat a fi utilizat.
Incalziți în palme sau pe abdomen placa adezivă de baza (flansa) timp de 1-2 minute pentru ca adezivul să “se incalzească” până la temperatura corpului dvs.



- 4.** Îndepărtați folia de plastic de placa de baza adezivă (flansa).



- 5.** Pozitionați flansa cu orificiul astfel decupat exact peste stoma. Asigurați-vă că ați pozitionat-o corect. Folosind 2 degetele (de preferat cel arătat și cel mijlociu), masați ușor circular de la interior către exterior pentru a finaliza lipirea flansei pe abdomen.



- 6.** Fixați punga colectoare de placa de baza (flansa), urmărind ghidajele circulare de plastic.



- 7.** Asigurați-vă că cele 2 componente sunt corect unite între ele, astfel încât tot conturul circular de plastic al pungii să fie suficient și integral introdus în canelura conturului circular al flansei.
Aveți grijă ca îmbrăcămintea dvs. să nu preseze punga colectoare pentru stoma.



Stomocur de la For Life
Sisteme stomice FABRICATE în GERMANIA

Dacă aveți întrebări vă rugăm să ne contactați la telefoanele menționate în broșură.